

Anleitung zur Verwendung und zur Aufbereitung von FFP2-Masken



FFP2-Masken sind von den Herstellern eigentlich für den einmaligen Gebrauch gedacht. Wenn sie täglich gebraucht werden, wie aktuell auch beim Transport Ihres Kindes (ab Jahren) durch den Malteser Fahrdienst, empfehlen Forscher Wege für eine mehrfache Verwendung:

1. **Aufheizen:**

Dieses Verfahren ist für faltbare FFP2-Masken gedacht.

Das sind die Masken, die man meistens regulär zum Kauf angeboten bekommt.

1. Die Maske zunächst bis zum nächsten Tag auf einem Haken trocknen lassen.
2. Den Backofen auf **80 (!)** Grad Ober-/Unterhitze vorheizen (Nicht heißer, sonst kann die Maske Schaden nehmen)
3. Maske auf den Rost legen und auf der mittleren Schiene in den Ofen schieben - **1 Stunde** dort lassen.
4. Wenn Masken für mehrere Personen gleichzeitig aufbereitet werden, am besten die Haltebänder farblich markieren.

Wichtig:

Aufbereitete Masken sollten immer von derselben Person genutzt werden.

2. **Lufttrocknen:**

Beim täglichen Gebrauch der Masken sind hierfür mindestens sieben Stück notwendig.

Wichtig:

Nach der Nutzung auf einen Haken hängen und 1 Woche (!) trocknen lassen!

Allgemein gilt: Der Trockenzyklus kann wie das Aufheizen maximal 5x wiederholt werden, ehe die Maske in den Müll wandert.

Gez. nach einem PNP-Artikel vom Donnerstag, den 14.1.2021
Kerstin Bürgermeister