



Mund-Nasen-Schutz



Das ist wichtig




Hände mit **Seife** für mindestens **30 Sekunden** waschen.



Mund-Nasen-Schutz anziehen.
Fasse nur die Gummibänder an.



Mund-Nasen-Schutz über
Nase und
Kinn ziehen.

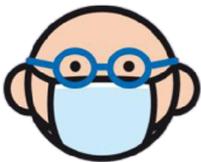

Wichtig für Brillenträger:
Die Brille ist über dem Mund-Nasen-Schutz.



Kontrolliere ob der Mund-Nasen-Schutz an den
Rändern eng anliegt



Fasse deinen Mund-Nasen-Schutz nur an den
Gummibändern an



Ist dein Mund-Nasen-Schutz **feucht**?
Oder **brauchst** du ihn gerade **nicht**?




1. **Lege** diesen in einen **Zip-Beutel** oder in eine **Dose**
2. **Schließe** den Zip-Beutel oder die Dose



3. Wasche deine Hände




4. setze einen **neuen oder - wenn er noch brauchbar ist - denselben Mund-Nasen-Schutz auf**

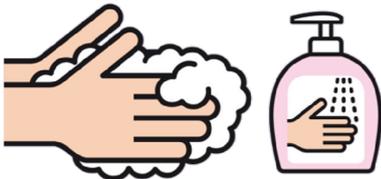


Nach dem **Anfassen** des Mund-Nasen-Schutzes die **Hände** mit Seife für 30 Sekunden **waschen**



Wasche deinen Mund-Nasen-Schutz mit der Waschmaschine. Bei mindestens 60 Grad

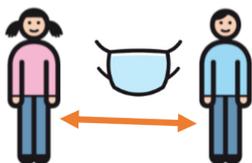

Den Mund-Nasen-Schutz darf man **nicht untereinander tauschen**.
Jeder hat seinen eigenen Mund-Nasen-Schutz

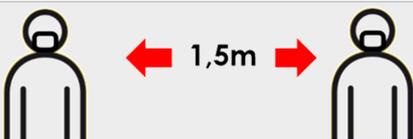

Trotz Mund-Nasen-Schutz:
Halte den **Sicherheits-Abstand** von **1,5 Metern** ein.